

taltz[®]
(ixékizumab)
injectable

Manuel d'utilisation du stylo pré-rempli **TALTZ**[®]



Taltz[®] 80 mg
solution injectable
en stylo pré-rempli
ixékizumab

Lilly

► Informations importantes sur le stylo pré-rempli Taltz[®]




- Avant d'utiliser le stylo pré-rempli Taltz[®], lisez et suivez attentivement les instructions étape par étape. Conservez ce manuel d'utilisation et consultez-le en cas de besoin.
- Le stylo pré-rempli contient 1 dose de Taltz[®]. Le stylo pré-rempli est à **USAGE UNIQUE EXCLUSIVEMENT**.
- Le stylo pré-rempli ne doit pas être secoué.
- Certaines parties du stylo pré-rempli sont en verre. Manipulez-le avec précaution. Si vous le faites tomber sur une surface dure, ne l'utilisez pas. Utilisez un nouveau stylo pour l'injection.
- Votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmier/ère pourra vous aider à choisir la partie du corps où injecter votre dose.
- Lisez la notice à l'intérieur de la boîte de Taltz[®] pour avoir plus d'informations sur ce médicament.

Instructions d'utilisation

i

Avant d'utiliser le stylo pré-rempli Taltz[®], lisez et suivez attentivement les instructions étape par étape.

► Légende des différents éléments du stylo

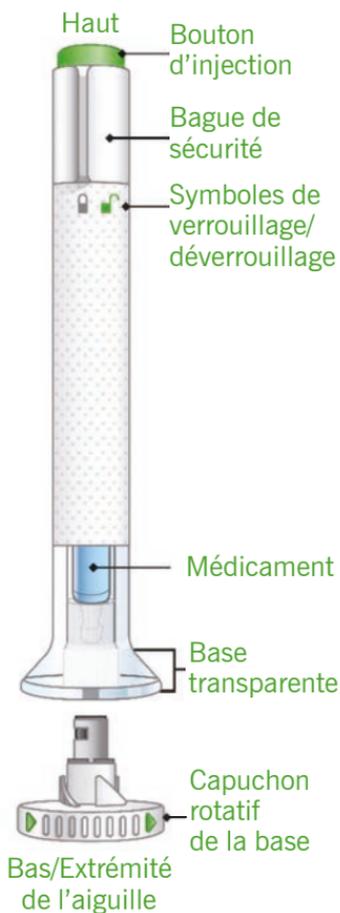

1a Sortez le stylo pré-rempli du réfrigérateur

Laissez le capuchon de la base jusqu'à ce que vous soyez prêt pour l'injection. **Attendez 30 minutes** pour laisser le stylo se réchauffer à température ambiante avant de l'utiliser.

N'UTILISEZ PAS de sources de chaleur telles qu'un micro-ondes, de l'eau chaude ou la lumière directe du soleil, pour réchauffer le médicament.

1b Rassemblez les éléments nécessaires à l'injection

- 1 compresse imbibée d'alcool
- 1 morceau de coton ou de gaze
- 1 collecteur pour objets piquants ou coupants pour y éliminer les stylos

1c Examinez le stylo pré-rempli

- Vérifiez l'étiquette. Assurez-vous que le nom Taltz[®] figure sur l'étiquette.



! Dans les cas suivants, n'utilisez pas le stylo et éliminez-le selon les recommandations :


- la date de péremption est dépassée,
- le stylo semble abîmé,
- le médicament est trouble, de couleur marron ou contient de petites particules.

1d Lavez-vous les mains avant de procéder à l'injection du médicament.

1e Choisissez le site d'injection

Vous pouvez effectuer l'injection :

- dans le ventre (abdomen),
- la cuisse, ou
- l'arrière du bras. Pour l'injection dans le bras, vous aurez besoin de quelqu'un pour vous aider.

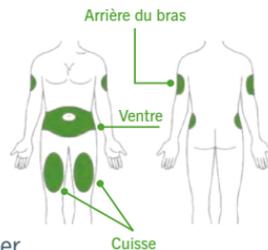

N'injectez pas le produit :

- dans des zones où la peau est sensible, présente des hématomes, est rouge ou dure, présente des cicatrices ou des vergetures,
- à moins de 2,5 cm autour du nombril,
- à chaque fois au même endroit.

Alternez les sites d'injection : par exemple, si la dernière injection a été effectuée dans la cuisse gauche, vous pouvez faire l'injection suivante dans la cuisse droite, le ventre ou à l'arrière de l'un des deux bras.

1f Préparez votre peau

Nettoyez votre peau avec une compresse imbibée d'alcool.


Laissez sécher naturellement le site d'injection avant de procéder à l'injection.



🔒 Vérifiez que la bague de sécurité est en position de verrouillage.

Laissez le capuchon de la base jusqu'à ce que vous soyez prêt pour l'injection. NE touchez PAS l'aiguille.

Tournez le capuchon de la base. Éliminez le capuchon à la poubelle. Vous ne devez pas remettre le capuchon de la base en place ; vous risqueriez d'abîmer l'aiguille ou de vous blesser accidentellement.

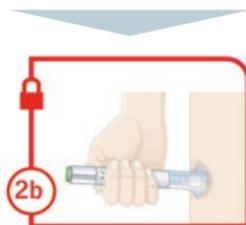


- Placez la base transparente bien à plat fermement sur votre peau.




Maintenez la base sur votre peau, puis tournez la bague de sécurité en position de déverrouillage.

Vous êtes maintenant prêt pour l'injection.

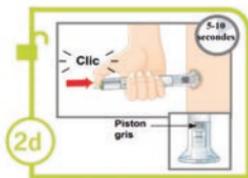

- Appuyez sur le bouton d'injection vert : vous devez entendre un clic.
- Maintenez fermement la base transparente contre votre peau.

- Vous devez entendre un 2^{ème} clic environ 5 à 10 secondes après le premier. Le deuxième clic plus fort indique que l'injection est terminée.
- Vous verrez que le piston gris doit se trouver en haut de la base transparente.
- Retirer le stylo pré-rempli de votre peau. Placer un morceau de coton ou de gaze sur le site d'injection et appuyez.
NE frottez **PAS** le site d'injection pour ne pas provoquer d'ecchymoses. Il peut y avoir un léger saignement. C'est normal.

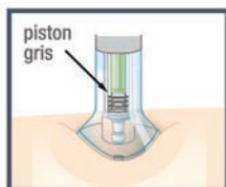

3a) **Éliminez le stylo pré-rempli utilisé**

NE REMETTEZ PAS le capuchon sur l'aiguille. Éliminez le stylo dans un collecteur pour objets piquants ou coupants ou selon les recommandations de votre médecin, de votre pharmacien ou de votre infirmier/ère.

- Ne recyclez pas le collecteur pour objets piquants ou coupants quand il est plein.
- Demandez à votre médecin, à votre pharmacien ou à votre infirmier/ère comment éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus.



① Qu'est-ce que les DASRI ?

Vous réalisez vous-même vos injections, attention : vous êtes responsable de l'élimination de vos déchets ! En effet, certains de vos déchets présentent un risque pour vous-même et pour toute autre personne susceptible d'entrer en contact avec. On appelle ainsi DASRI les Déchets d'Activité de Soins à Risques Infectieux. Ils incluent les aiguilles et tout matériel piquant, coupant ou perforant potentiellement contaminé par des agents biologiques pathogènes représentant alors un risque d'infection. Dans le cadre de votre traitement en auto-injection, vous devez vous munir de boîtes à aiguilles (ou collecteurs) pour vous aider à éliminer comme il se doit les seringues et aiguilles usagées. **En aucun cas les DASRI ne doivent être mélangés et éliminés avec les ordures ménagères.** Seuls les cotons, lingettes antiseptiques et autres fournitures peuvent être éliminés à la poubelle.

② Comment se procurer ces boîtes à aiguilles ?

Ces boîtes à aiguilles sont disponibles gratuitement dans les pharmacies, sur présentation de votre ordonnance.

③ Comment utiliser les boîtes à aiguilles ?

- Rangez les boîtes à aiguilles hors de portée des enfants.
- Ne pas remplir la boîte à aiguilles au-delà du trait supérieur.
- Lorsque la boîte est pleine, vous devez la fermer définitivement.
- Le délai de stockage de la boîte à aiguilles ne doit pas dépasser 3 mois.

④ Où faut-il rapporter les boîtes à aiguilles ?

Rapportez la boîte à aiguille fermée à un point de collecte. Pour connaître les points de collecte les plus proches, renseignez-vous auprès de votre pharmacien/médecin, de votre mairie, sur le site internet <http://nous-collectons.dastri.fr>.





Afin de vous accompagner dans l'utilisation de ce stylo, nous vous proposons de redécouvrir ces différentes étapes en vidéo :



POUR Y ACCÉDER :

<https://www.lilly.fr/nos-medicaments/liste-medicaments/taltz-lilly/video-d-utilisation-stylo>

ou



iOS



**Téléchargez
une application QR code
et flashez le code**



ANDROID



CONSEILS DE SÉCURITÉ



- Si vous avez des questions ou besoin d'aide pour utiliser le stylo pré-rempli, contactez votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmier/ère.
- Si vous avez des problèmes de vue, **N'UTILISEZ PAS** le stylo pré-rempli sans l'aide d'une personne formée à son utilisation.
- Tenez le stylo hors de la vue et de la portée des enfants.
- Si vous n'avez pas de collecteur pour objets piquants ou coupants, demandez à votre médecin, à votre pharmacien ou à votre infirmier/ère où vous pouvez vous en procurer un.



► **Que dois-je faire si je vois des petites bulles d'air dans le stylo pré-rempli ?**

Il est normal que le stylo contienne parfois des petites bulles d'air. Taltz[®] est injecté sous votre peau (injection sous-cutanée). La présence de petites bulles d'air ne pose pas de problème pour ce type d'injection. Cela n'est pas dangereux et n'a pas d'effet sur la dose.

► **Que faire s'il y a une goutte de liquide au bout de l'aiguille quand je retire le capuchon de la base du stylo pré-rempli ?**

La présence d'une goutte de liquide au bout de l'aiguille est normale. Cela n'est pas dangereux et n'a pas d'effet sur la dose.

► **Comment faire si j'ai déverrouillé le stylo pré-rempli et appuyé sur le bouton vert d'injection avant de retirer le capuchon de la base ?**

Ne retirez pas le capuchon de la base. Contactez votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmier/ère.

► **Faut-il maintenir le bouton d'injection enfoncé du stylo pré-rempli jusqu'à la fin de l'injection ?**

Cela n'est pas nécessaire mais peut vous aider à maintenir le stylo pré-rempli bien à plat contre votre peau.

► **Que dois-je faire si l'aiguille du stylo pré-rempli ne se rétracte pas après l'injection ?**

Ne touchez pas l'aiguille et ne remettez pas le capuchon de la base. Éliminez le stylo pré-rempli dans un collecteur pour objets piquants ou coupants refermable et résistant à la perforation. Contactez votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmier/ère.

QUESTIONS

► J'ai entendu plus de deux clics pendant l'injection avec le stylo pré-rempli, deux forts et un plus faible. L'injection a-t-elle été complète ?

Certains patients peuvent entendre un petit clic juste avant le deuxième clic fort. C'est normal. Ne retirez pas le stylo de votre peau avant d'avoir entendu le deuxième clic fort.

► Comment savoir si l'injection avec le stylo pré-rempli est terminée ?


Après avoir appuyé sur le bouton d'injection vert, vous devez entendre deux clics forts. Le deuxième clic indique que l'injection est terminée. Le piston gris doit se trouver en haut de la base transparente.


► Que faire si le stylo pré-rempli est laissé à température ambiante pendant plus de 30 minutes ?

Si nécessaire, le stylo pré-rempli peut être laissé en dehors du réfrigérateur jusqu'à 5 jours à une température ne dépassant pas 30 °C s'il est conservé à l'abri de la lumière directe du soleil. Taltz® doit être éliminé s'il n'est pas utilisé pendant la période de 5 jours à température ambiante.

Pour plus d'information, veuillez consulter la notice dans la boîte de votre médicament ou sur la base de données publique des médicaments : <http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/>

i

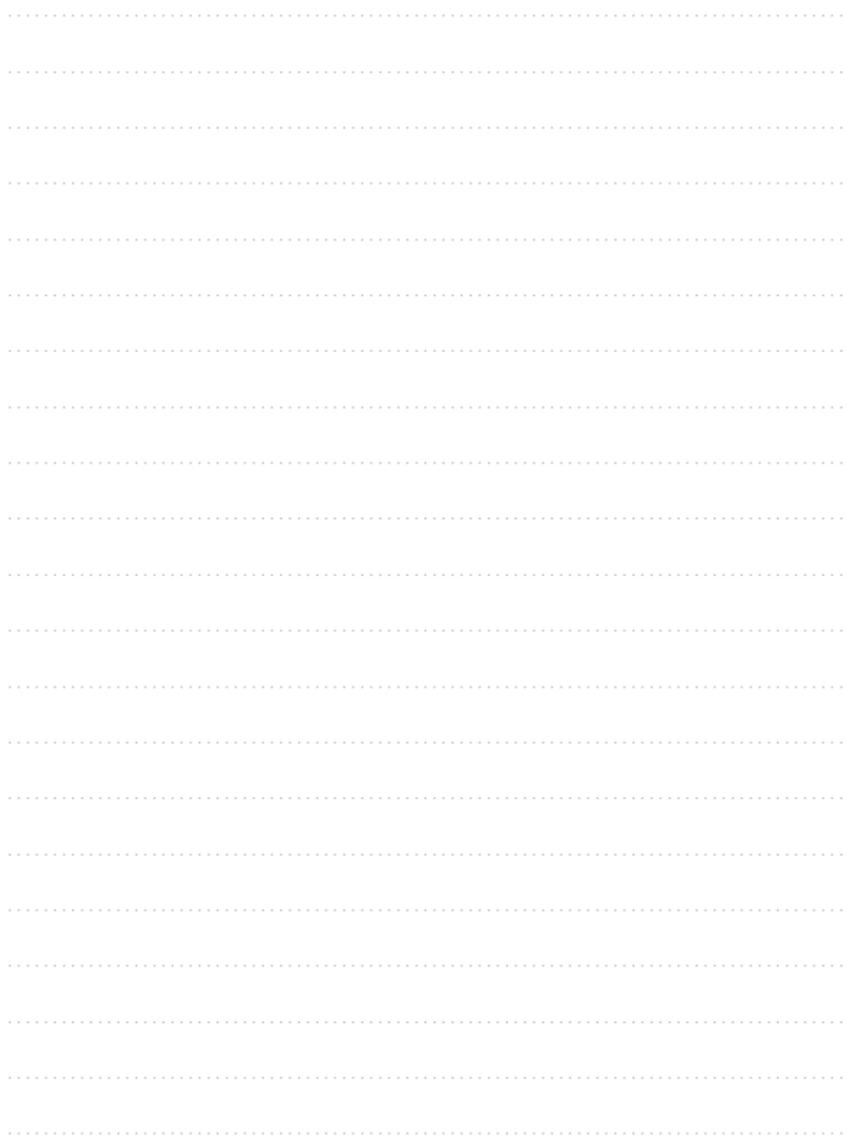

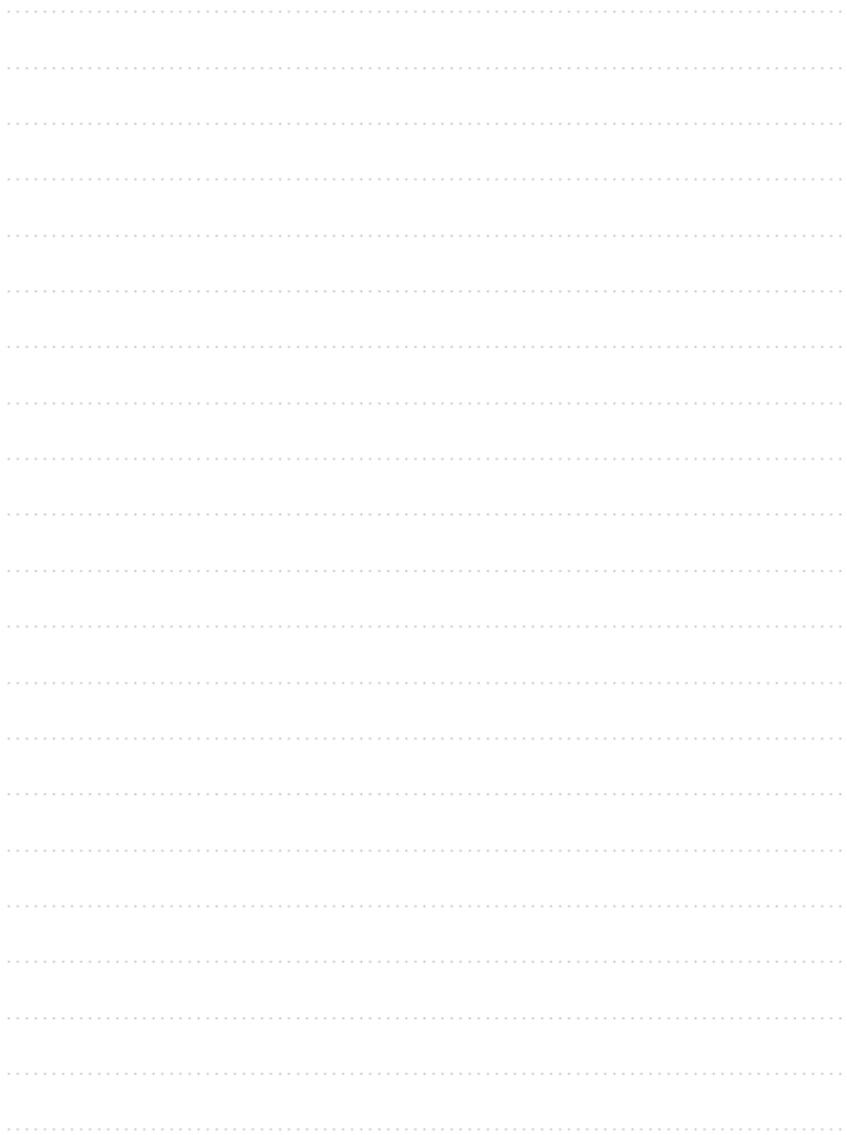

taltz[®]
(ixékizumab)
injectable



Pour toute demande d'information concernant nos produits ou services, vous pouvez contacter le service d'information médicale et pharmacovigilance de Lilly au :

0 800 00 36 36 Service & appel gratuits

ou tel : 01.55.49.32.51

fax : 01.55.49.33.07

www.lilly.fr

Ce médicament fait l'objet d'une surveillance supplémentaire qui permettra l'identification rapide de nouvelles informations relatives à la sécurité. Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin, pharmacien ou infirmier/ère. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans la notice d'information. Nous vous rappelons que tout effet indésirable doit être déclaré au Centre régional de pharmacovigilance (CRPV) dont vous dépendez ou via le portail de signalement des événements sanitaires indésirables du ministère chargé de la santé <https://signalement.social-sante.gouv.fr/>.

Pour plus d'information, consulter la rubrique « Déclarer un effet indésirable » sur le site internet de l'ANSM : <http://ansm.sante.fr>. En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

Lilly France

24 boulevard Vital Bouhot – CS 50004 – 92521 Neuilly sur Seine Cedex (FRANCE)

Tél. : 01 55 49 34 34 – Fax : 01 41 44 02 47 - www.lilly.fr – Société par

Actions Simplifiée – R.C.S. Nanterre B 609 849 153. Information Médicale

et Pharmacovigilance : **0 800 00 36 36** Service & appel gratuits

ou tél. : 01.55.49.32.51. - fax : 01.55.49.33.07



LE TRI
+ FACILE

