

Utilisation des stylos* HumatroPen®



AVANT TOUTE UTILISATION vérifiez la correspondance
entre votre stylo et le dosage de la cartouche.

Si votre médecin change le dosage de votre cartouche,
vous devez **impérativement changer de stylo**.
Demandez-lui **le stylo qui correspond**.

* Dispositif médical de classe IIb (marquage CE 0344)


N'utilisez pas le matériel sans avoir été préalablement formé par votre médecin, pharmacien ou infirmier/ère. Interrogez-les si vous n'êtes pas sûr(e) d'avoir compris l'ensemble de la procédure. Pour plus d'information, veuillez consulter la notice dans la boîte de votre médicament ou sur la base de données publique des médicaments : <http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/>



Lilly


1

Mise en solution de la cartouche

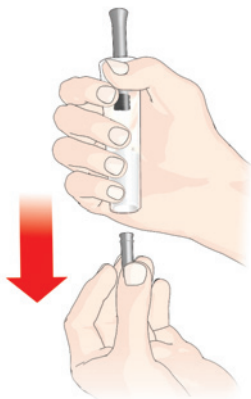


1. Lavez-vous les mains.
Retirez le capuchon de l'aiguille de solvant et jetez-le.


Pour une information plus complète, veuillez consulter la notice se trouvant dans la boîte du produit.

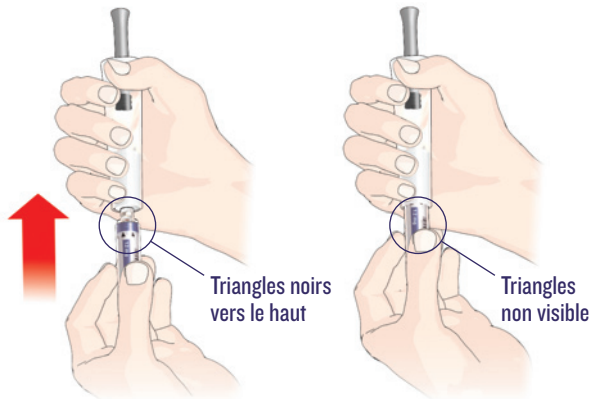


2. Tenez **VERTICALEMENT** la seringue.
Insérez la cartouche **DROIT** dans l'axe:
- Triangles noirs vers le haut,
 - Logo rouge Lilly vers le bas, jusqu'à ce que les triangles noirs soient recouverts.
- Vous ressentirez ou entendrez sans doute un clic.**
NE VISSEZ PAS la cartouche.

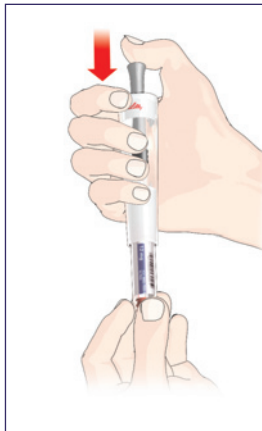

3. Appuyez **DOUCEMENT** sur le piston en relâchant 2 ou 3 fois jusqu'à ce que tout le solvant soit dans la cartouche.

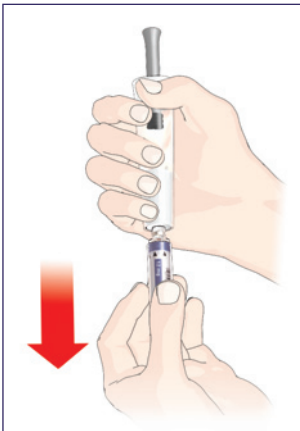

4. Vérifiez que la seringue de solvant est vide puis enlevez la cartouche. Enfoncez la seringue de solvant sur le bouchon posé sur une table et jetez le tout.

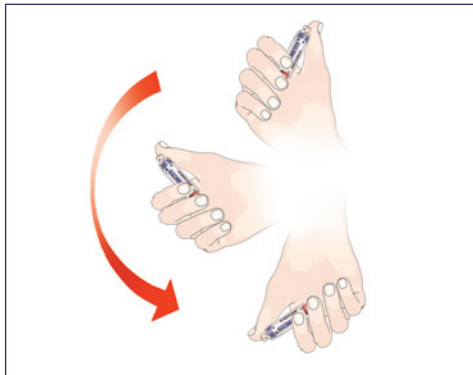

5. Retourner doucement **10 fois** la cartouche **SANS AGITER**. Laissez reposer **3 minutes**. Inspectez attentivement la solution. Si la solution est trouble ou contient des particules, retournez doucement la cartouche **10 fois** et laissez reposer la cartouche **5 minutes** de plus. Si la solution reste trouble ou contient des particules, **LA CARTOUCHE NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉE**.

2

Mise en place de la cartouche



A CHAQUE STYLO SA CARTOUCHE

Avant toute utilisation, toujours vérifier la concordance entre la cartouche et le stylo

HumatroPen®
6 mg



HumatroPen®
12 mg





HumatroPen®
24 mg




Note : « 12 mg » est indiqué ici à titre d'exemple mais ce pourrait être « 6 mg » ou « 24 mg » selon le dosage de votre cartouche

Si votre médecin change le dosage de votre cartouche, vous devez impérativement changer de stylo. Demandez-lui le stylo qui correspond

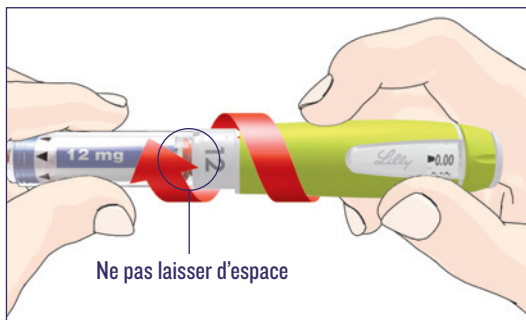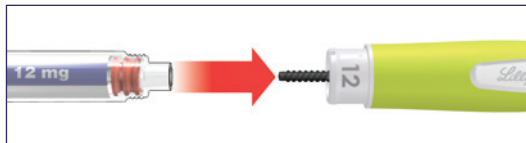

1. Enlevez le capuchon du stylo et vissez la cartouche au stylo jusqu'à la butée

Pour une information plus complète, veuillez consulter la notice du produit et le manuel d'utilisation du stylo

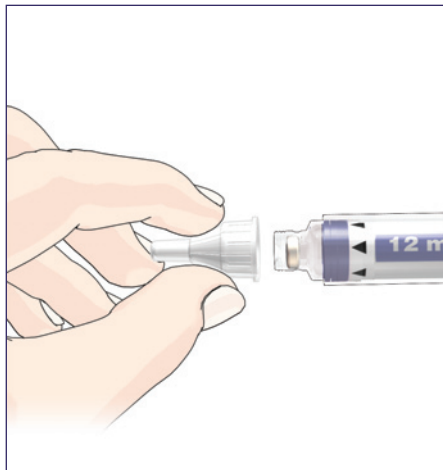

2. Vissez l'aiguille

2

Mise en place de la cartouche (suite)

Purgez votre stylo **uniquement** lors de la mise en place d'une cartouche

Stylo de


Dose à sélectionner pour la purge du stylo




1,25 mg




2,50 mg

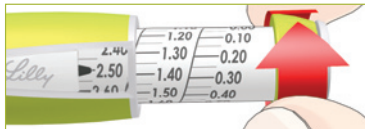

5,00 mg

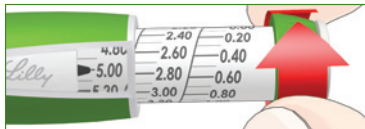

Une goutte doit perler au bout de l'aiguille

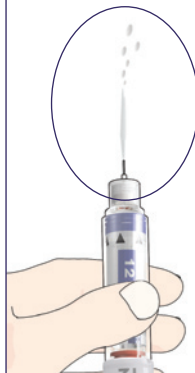

Si aucune goutte ne perle, purger à nouveau de

0,05 mg

0,10 mg

0,20 mg



Selon les différents dosages du stylo, la dose nécessaire pour la purge est différente.

IMPORTANT : respectez les doses de purge nécessaires au bon fonctionnement de votre stylo.

3



Utilisation quotidienne

- 1 - Retirez le capuchon du stylo.
- 2 - Vérifiez que le dosage de la cartouche et le stylo concordent.
- 3 - Fixez une nouvelle aiguille à chaque injection.
- 4 - Sélectionnez la dose désirée en tournant la bague de dosage.
- 5 - Nettoyez le site d'injection avec un coton imbibé d'alcool et injectez la dose en appuyant lentement sur le bouton d'injection. Maintenez le bouton d'injection pendant 5 secondes, puis retirez l'aiguille de la peau.
- 6 - Vérifiez que la fenêtre de lecture indique bien « 0.00 », ce qui confirme que la dose complète a bien été injectée.
- 7 - Enlevez l'aiguille du stylo et jetez-la conformément aux recommandations du chapitre "6. Elimination des déchets" présenté ci-après.
- 8 - Remettez le capuchon et placez le stylo dans sa boîte au réfrigérateur (+2°C et +8°C) jusqu'à la prochaine injection.

NE PAS CONGELER

NB : Ne pas retirer la cartouche du stylo tant qu'elle n'est pas vide (ou qu'elle nécessite d'être changée car reconstituée depuis plus de 28 jours)


Pour une information plus complète, veuillez consulter la notice du produit et le manuel d'utilisation du stylo

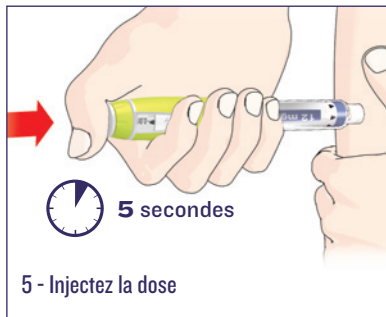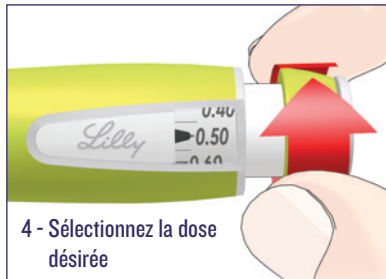

4

Utilisation optionnelle du cache aiguille


- 1 - Retirez le capuchon du stylo, puis fixez une nouvelle aiguille.
- 2 - Vérifiez que le cache-aiguille est sur la position « fermée » et fixez-le au stylo. Puis tournez le cache-aiguille en position « ouverte ».
- 3 - Sélectionnez la dose désirée en tournant la bague de dosage.
- 4 - Nettoyez le site d'injection avec un coton imbibé d'alcool et injectez la dose en appuyant lentement sur le bouton d'injection. Maintenez le bouton d'injection pendant 5 secondes, puis vérifiez que le cache-aiguille est sur la position « fermée ».
- 5 - Vérifiez que la fenêtre de lecture indique bien « 0.00 », ce qui confirme que la dose a bien été injectée.
- 6 - Enlevez le cache-aiguille, puis retirez l'aiguille du stylo et jetez-la conformément aux recommandations du chapitre "6. Elimination des déchets" présenté ci-après.
- 7 - Remettez le capuchon et placez le stylo dans sa boîte au réfrigérateur (+2°C et +8°C) jusqu'à la prochaine injection.

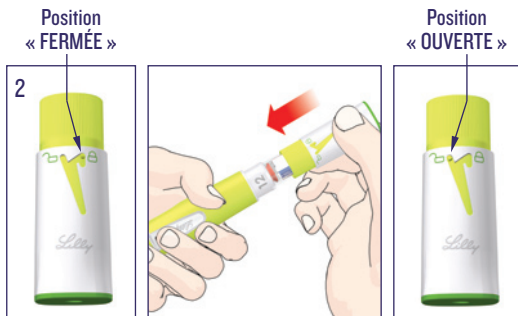

NE PAS CONGELER

5

Sites d'injection et conseils de conservation

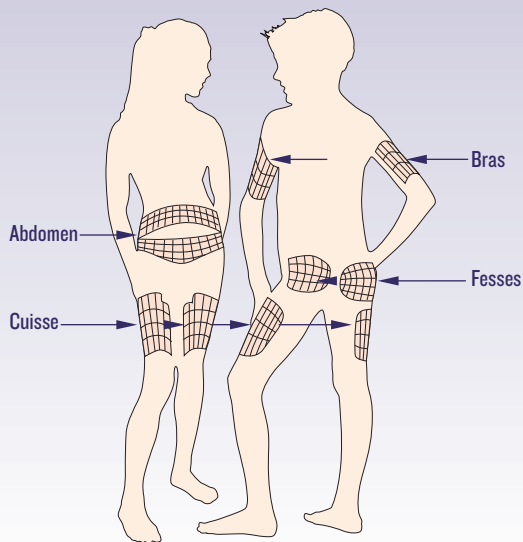

- **Avant reconstitution,**
durée de conservation : **3 ans.**
- **A conserver** au réfrigérateur
(entre **+2°C** et **+8°C**).
Ne pas congeler.
- Après reconstitution, le produit peut
être conservé jusqu'à **28 jours**
entre **+2°C** et **+8°C**.
- **L'exposition quotidienne à une
température ambiante ne doit pas
excéder 30 minutes.**



6

Elimination des déchets

I. Qu'est-ce que les DASRI ?


Vous réalisez vous-même vos injections, attention : vous êtes responsable de l'élimination de vos déchets ! En effet, certains de vos déchets présentent un risque pour vous-même et pour toute autre personne susceptible d'entrer en contact avec.

On appelle ainsi DASRI les Déchets d'Activités de Soins à Risques Infectieux. Ils incluent les aiguilles et tout matériel piquant, coupant ou perforant potentiellement contaminé par des agents biologiques pathogènes représentant alors un risque d'infection.

Dans le cadre de votre traitement en auto-injection, vous devez vous munir de boîtes à aiguilles (ou collecteurs) pour vous aider à éliminer comme il se doit les seringues et aiguilles usagées.

En aucun cas les DASRI ne doivent être mélangés et jetés avec les ordures ménagères.

Seuls les cotons, lingettes antiseptiques et autres fournitures peuvent être jetés à la poubelle.

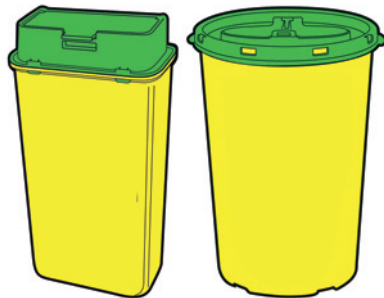

2. Comment se procurer ces boîtes à aiguilles ?

Ces boîtes à aiguilles sont disponibles gratuitement dans les pharmacies, sur présentation de votre ordonnance.

3. Comment utiliser les boîtes à aiguilles ?

- Rangez les boîtes à aiguilles hors de portée des enfants.
- Ne pas remplir la boîte à aiguilles au-delà du trait supérieur.
- Lorsque la boîte est pleine, vous devez la fermer définitivement.
- Le délai de stockage de la boîte à aiguilles ne doit pas dépasser 3 mois.

4. Où faut-il rapporter les boîtes à aiguilles ?

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
Rapportez la boîte à aiguille fermée à un point de collecte.

Pour connaître les points de collecte les plus proches, renseignez vous auprès de votre pharmacien/médecin, de votre mairie, sur le site internet :

<https://www.dastri.fr/nous-collectons>




Notes





Notes

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

AVANT UTILISATION toujours vérifier que
le dosage de la cartouche correspond au dosage
marqué sur le stylo

Si votre médecin **change** le dosage de votre
cartouche vous devez **impérativement changer de
stylo**. Demandez-lui **le stylo qui correspond**.

Pour toute question contactez le Service d'Information Médicale

0 800 00 36 36 Service & appel gratuits

ou 01 55 49 32 51

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, ou en cas d'erreur
médicamenteuse, parlez-en à votre médecin, pharmacien ou infirmier/ère.

Lilly



Note : « 12 mg » est indiqué ici à titre
d'exemple mais ce pourrait être « 6 mg » ou
« 24 mg » selon le dosage de votre cartouche



Lilly France, 24 boulevard Vital Bouhot
CS 50004 - 92521 Neuilly-sur-Seine Cedex
Tél. : 01 55 49 34 34 - Fax : 01 41 44 02 47
www.lilly.fr - S.A.S au capital de 375 713 701 €
609 849 153 - R.C.S. Nanterre